



TENS MED S82



Pequeñas dimensiones,
grandes resultados!



TENSMED S82

El TENSMED S82 es la opción definitiva para el tratamiento profesional de la estimulación muscular y alivio del dolor.

Este dispositivo puede tratar el dolor crónico, atender a pacientes que se recuperan de una dolencia crónica, tratar la inmovilización y mejorar la postura y la estabilización de la articulación de la rodilla mediante la electroestimulación percutánea de los nervios o TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation). Los tratamientos TENS son seguros, no tienen efectos secundarios y pueden ser una excelente alternativa a la medicación analgésica.

El modelo TENSMED S82 es un electroestimulador de dos canales equipado con una pantalla LCD claramente legible.

65 Programas

- 12 Deporte
- 8 Fitness, belleza y bienestar
- 16 Dolor (TENS)
- 9 Prevención
- 11 Rehabilitación
- 3 Incontinencia
- 6 Programas libres




PRESET

Características especiales

PROGRAMABLE	6 posiciones de memoria libres para crear programas personalizados
PROGRAMAS PREDEFINIDOS	59 programas para tratamientos contra el dolor y de rehabilitación funcional.
MENÚ RÁPIDO	Para navegar más rápidamente por las opciones.
ESTIMULACIÓN SINCRONIZADA	Permite incrementar la intensidad de los dos canales simultáneamente con tan solo un botón.
PANTALLA RETROILUMINADA	La pantalla LCD claramente legible permite optimizar la usabilidad y facilitar el uso del dispositivo.
FUNCIONA CON PILAS	



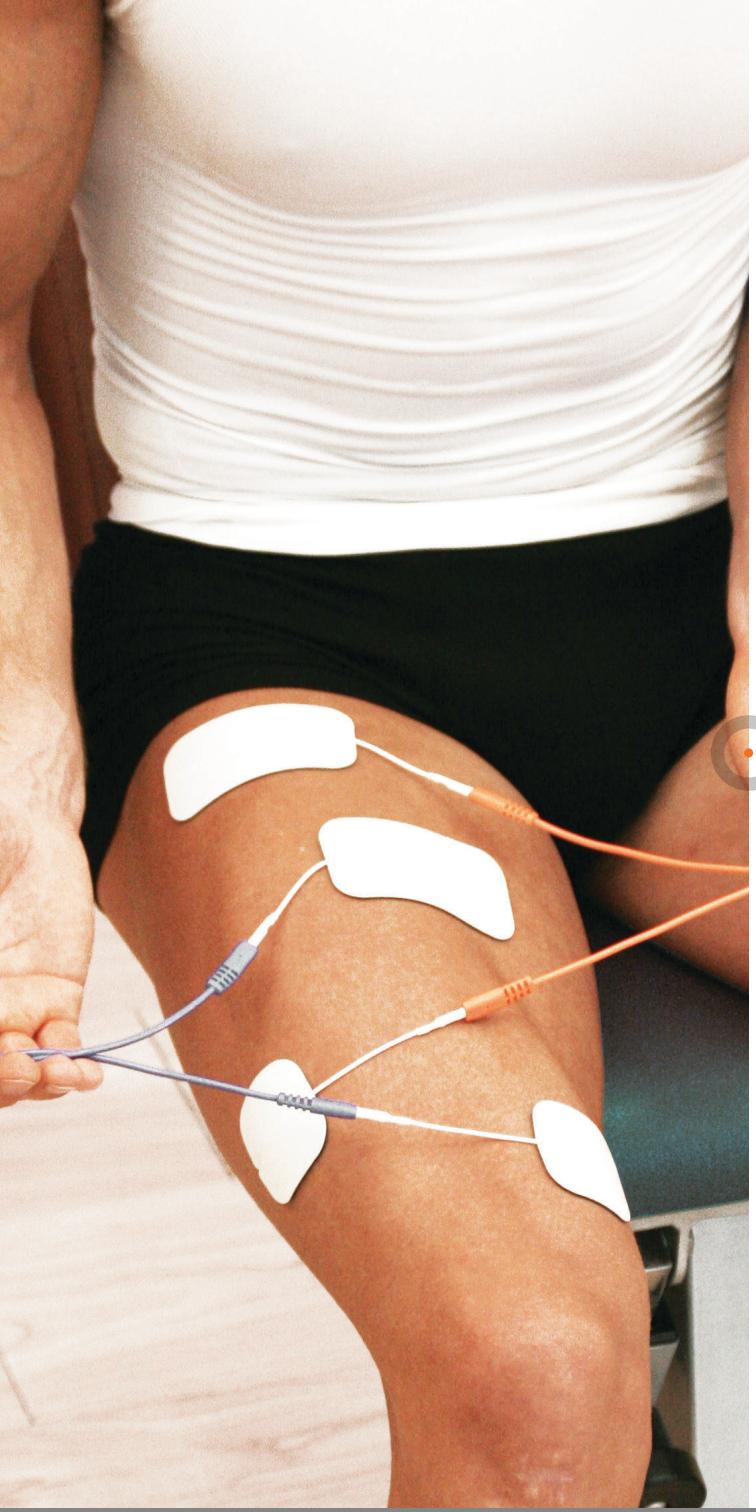

TENSMED S82 programas

Rehabilitación

Los programas de estimulación muscular están especialmente indicados para la recuperación funcional tras intervenciones quirúrgicas en articulaciones y después de períodos de inmovilización. El dispositivo incluye programas para el refuerzo del músculo vasto medial tras cirugías del ligamento cruzado anterior, programas de prevención, funciones de recuperación del tono atlético y programas para la hemiplejia.

Dolor

Elimine el dolor gracias a los pulsos especiales de las corrientes TENS que estimulan suavemente el organismo y permiten recobrar la salud, el bienestar y disfrutar de nuevo de la vida. El dispositivo incluye programas para tratar dolores crónicos y agudos, dolor cervical, lumbago, periartritis, epicondilitis, ciática y lesiones en los tejidos blandos.

Incontinencia

Programas específicos para el tratamiento de trastornos urológicos como el síndrome miccional, la urgencia urinaria y la incontinencia mixta.

TENSMED S82 programas

Deporte

TENSMED S82 está programado para estimular de forma selectiva las fibras lentes y rápidas, con el fin de someter a entrenamiento diferentes cualidades de los músculos. Incluye programas de calentamiento, fuerza máxima, fuerza resistencia, fuerza explosiva, descontracción (relajación muscular), capilarización y recuperación activa tras competiciones o entrenamientos.

Fitness, Belleza y Salud

La belleza del cuerpo es una expresión del bienestar y una forma de equilibrio que debemos valorar y defender de las agresiones a la que está sometida por el sedentarismo y el paso del tiempo. Gracias a TENSMED S82, podrá cuidar su cuerpo y proteger su vitalidad y belleza mediante los tratamientos de belleza basados en la electroestimulación. Una opción ideal para tratamientos de drenaje, lipólisis o vascularización, para reafirmar, tonificar, esculpir o ganar masa.

Prevención

Programas para reforzar las principales articulaciones (como hombros, caderas y rodillas) y prevenir traumatismos y lesiones.



TENSMED S82

DATOS DE PEDIDO

1727901 Tensmed S82

Accesorios estándar

Bolsa de transporte


2 Cables para la conexión de electrodos

4 Electrodos cuadrados autoadhesivos (50x50mm)

4 Electrodos rectangulares autoadhesivos (50x90mm)

Cargador

Manual de uso

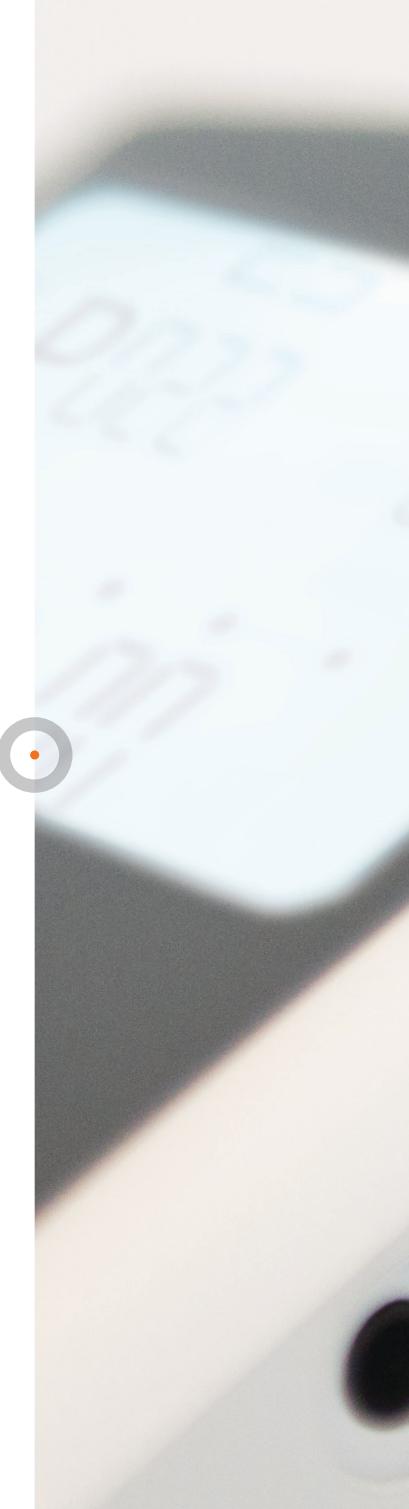

Número de canales::	2 canales no independientes
Intensidad:	0-100 mA por canal
Forma de onda:	Corriente pulsada bifásica simétrica, 100% compensado
Corriente constante:	a un resistencia de 1000 ohm
Frecuencia:	1 – 150 Hz
Ancho de pulso (monofásico):	50-400 µs
Duración total del pulso:	100-800 µs
Número de programas predefinidos:	59
Número de programas al uso::	6
Formas de Estimulación:	Convencional / Continua, Burst, Modulación de la frecuencia, Modulación de ancho de pulso, Intermitente
Temporizador:	max. 100 min
Sumistro eléctrico:	Conexión a la red o con pilas
Pilas:	Pilas recargable (NI-MH / 800mAh / 4.8V)
Cargador:	Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz, 0,32 max. Salida: 6,5V --- 200mA
Tamaño:	130x80x20 mm
Peso:	220 g
Pantalla retroiluminada	

Este es un dispositivo médico.

Cumple con todas las regulaciones médicas aplicables. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de uso (descargables a través de www.enraf-nonius.com).




Electrodos EN-Trode

3444222 EN-Trode Ø 2,2 cm, 2 mm hembra, 10 envases de 8 (también por EMG)

3444056 EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm hembra, 10 envases de 4

3444057 EN-Trode 5x5 cm, 2 mm hembra, 10 envases de 4

3444058 EN-Trode 5x9 cm, 2 mm hembra, 10 envases de 4

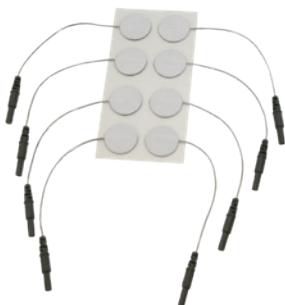

3444222



3444056



3444057



3444058



Electrodos de caucho

- 3444128 Electrodos de caucho 4x6 cm, 2 mm hembra, juego de 2
- 3444129 Electrodos de caucho 6x8 cm, 2 mm hembra, juego de 2
- 3444130 Electrodos de caucho 8x12 cm, 2 mm hembra, juego de 2
- 3444380 Electrodo de silicona 5x5 cm TENS, 2 mm



3444128




3444129



3444130



3444380

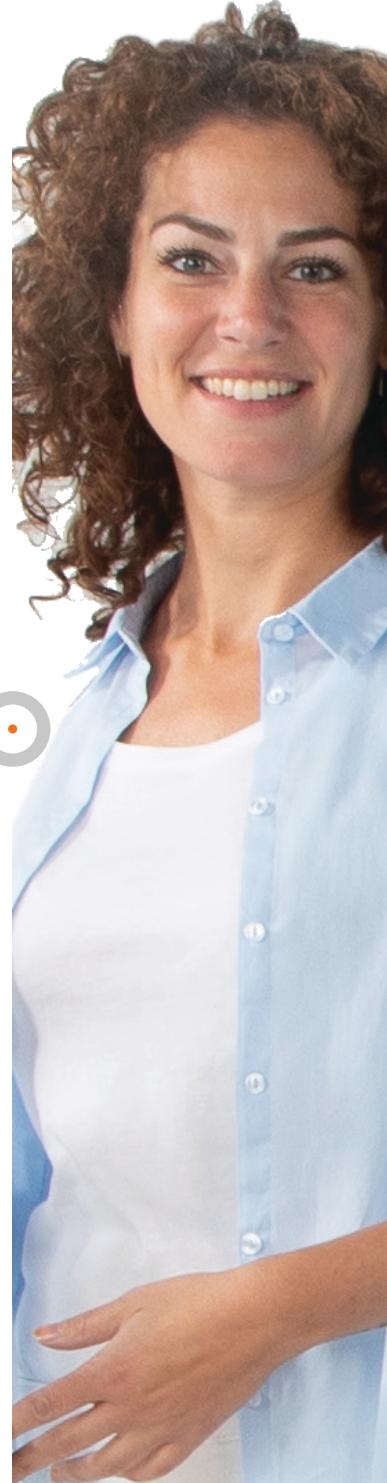

Almohadillas húmedas para electrodos


- 1460273 Almohadillas húmedas para electrodos de 4x6 cm, juego de 4
- 1460266 Almohadillas húmedas para electrodos de 6x8 cm, juego de 4
- 1460275 Almohadillas húmedas para electrodos de 8x12 cm, juego de 4

Electrodos puentagudo

- 3444180 Electrodo puentagudo Ø 5 mm, 2 mm hembra, incluye 10 tapas de goma conductora

Adaptador

- 2523524 Adaptador de 4 mm macho a 2 mm hembra, rojo
- 2523523 Adaptador de 4 mm macho a 2 mm hembra, negro

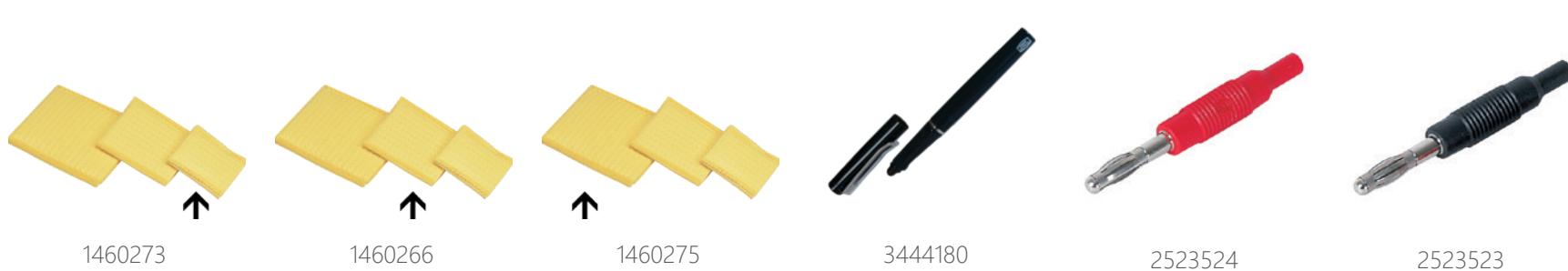



TENS MED S82

Pequeñas dimensiones,
grandes resultados!

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | The Netherlands

www.enraf-nonius.com | info@enraf-nonius.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600

